

A photograph of a man with a mustache, wearing a blue baseball cap and a blue t-shirt, looking off to the side. The background is blurred, showing what appears to be an outdoor setting with buildings and trees.

**Checklist
para la evaluación
de pacientes
Peristeen[®] Plus**

Peristeen[®] Plus

Peristeen® Plus Checklist para la evaluación de pacientes

Nombre (iniciales) _____




Fecha _____

Contraindicaciones	
Peristeen Plus no se debe utilizar en las siguientes situaciones:	
Estenosis anal o colorrectal conocida	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cáncer colorrectal (activo/recurrente)	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
En los 3 meses siguientes a la cirugía anal o colorrectal	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
En las 4 semanas siguientes a una polipectomía endoscópica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Colitis isquémica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Enfermedad intestinal inflamatoria aguda	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Diverticulitis aguda	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Peristeen Plus no está recomendado en:	
Niños menores de 3 años	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Embarazo actual o previsto y en mujeres lactantes	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Precauciones	
Precaución especial para cualquiera de los siguientes casos:	
Cualquier problema anorrectal que pueda causar dolor o hemorragia, por ejemplo, fisura anal, fístula anal o hemorroides de tercer o cuarto grado	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Impactación fecal/estreñimiento grave. En caso de estreñimiento severo (impactación fecal), es obligatorio realizar una limpieza inicial del intestino antes de iniciar el procedimiento de la irrigación transanal con Peristeen Plus	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Radioterapia en la región abdominal o pélvica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Diverticulosis severa o absceso diverticular	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cirugía anal o colorrectal previa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cirugía mayor pélvica previa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Disreflexia autónoma severa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tratamiento a largo plazo con corticoides	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Diátesis hemorrágica o tratamiento anticoagulante (excluyendo aspirina o clopidogrel)	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cambio en el patrón de defecación, como una diarrea súbita de origen desconocido. La causa de la diarrea debe ser identificada	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Medicación rectal, dado que el efecto de dicha medicación puede reducirse debido a la irrigación transanal	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Información para el paciente	
Revisión de la historia clínica y tacto rectal	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Resultados/Comentarios _____	
¿Tiene el paciente una anatomía intestinal frágil -cirugía anal, colorrectal o pélvica previa, y/o radioterapia?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
En caso afirmativo, ¿se ha realizado una endoscopia, una defecografía o un examen comparable para determinar si el intestino podría soportar el procedimiento de ITA con Peristeen Plus?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Comprende el paciente los posibles riesgos y beneficios de Peristeen Plus y acepta iniciar el tratamiento?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Es el paciente capaz de realizar la técnica de la ITA con Peristeen Plus de forma independiente?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Si no es así, ¿tiene un cuidador o cuidadores que le apoyen con Peristeen Plus?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Quién es el cuidador? _____	
¿Necesitará el cuidador formación?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Peristeen Plus Uso recomendado Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<small>Si se considera que el paciente es apto para iniciar el tratamiento con Peristeen Plus, recuerde programar la formación y el seguimiento adecuados. La primera irrigación del paciente debe ser supervisada por un profesional sanitario.</small>	

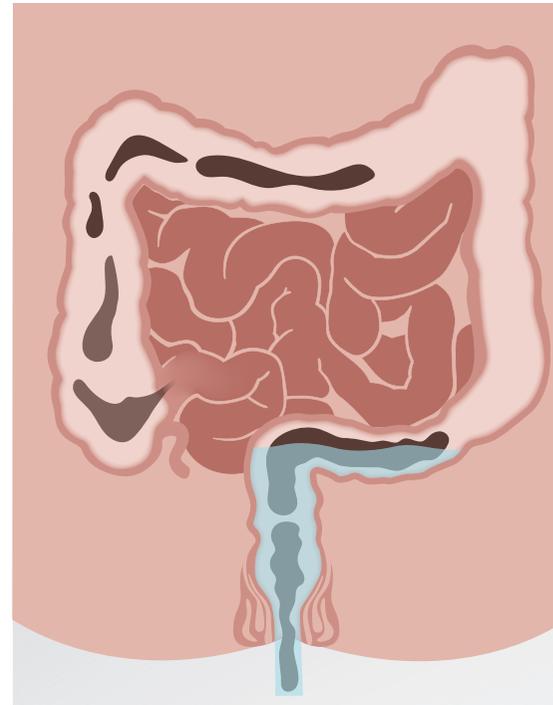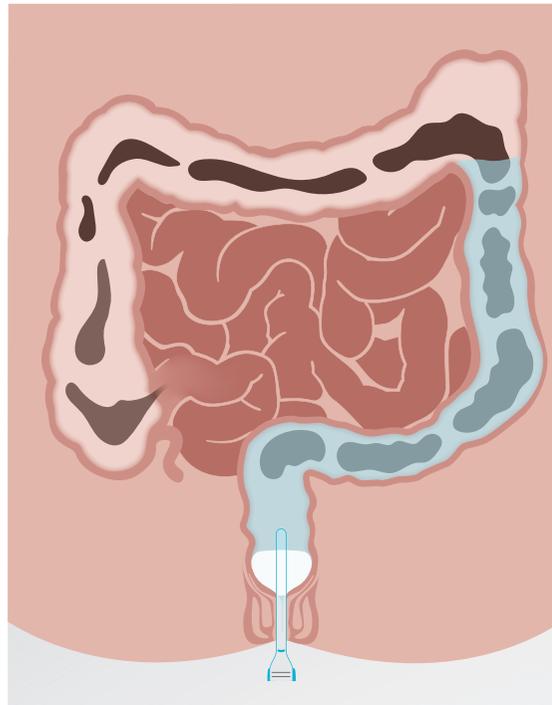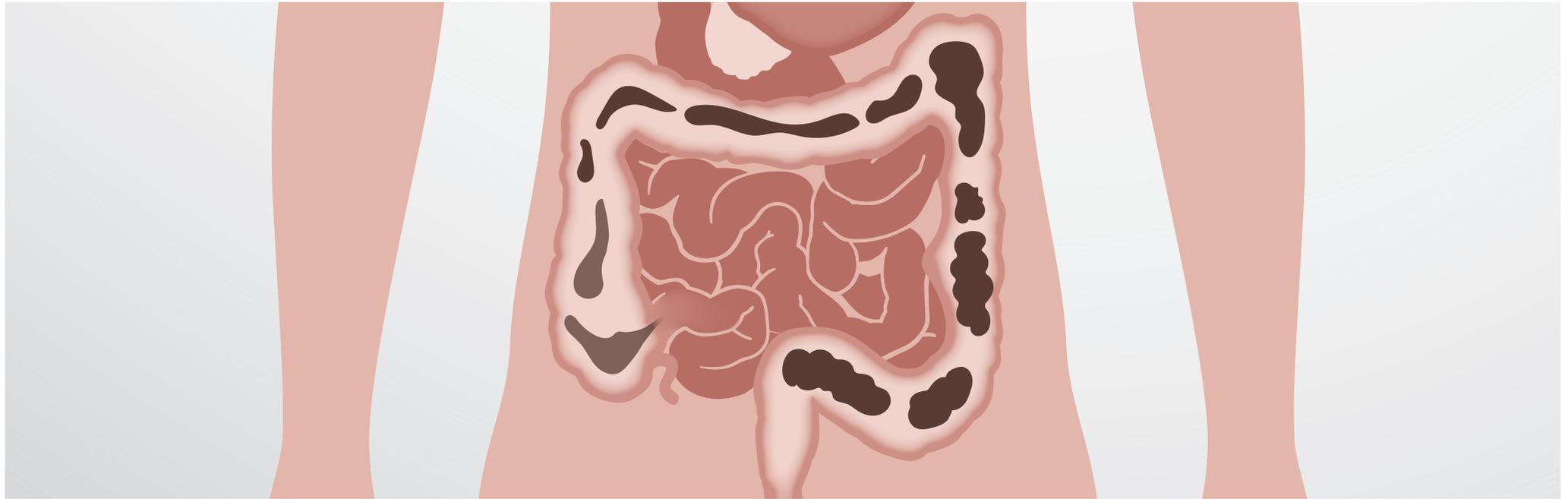

Peristeen® Plus

Coloplast desarrolla productos y servicios para facilitar la vida de las personas con necesidades especiales.

Trabajando cerca de las personas que utilizan nuestros productos, desarrollamos soluciones que se adaptan a sus necesidades.

Nuestro negocio incluye el cuidado de la ostomía, urología, cuidado de la continencia, así como de las heridas y de la piel.

Operamos a nivel mundial y tenemos más de 12.000 empleados.

[Ostomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Interventional Urology](#)

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A. Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid, España
www.coloplast.com Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2021/04 - 460NLB4192 - PM-16311

